

## **i** mylife™ SafetyLancets

Prélèvement de sang capillaire sans risque de blessure par aiguille

**Le design innovant et breveté rend le prélèvement de sang capillaire sûr et aisé. Le système de verrouillage et le capuchon de protection scellé garantissent une sécurité maximale et protègent les patients ainsi que le personnel soignant de toute contamination croisée et de piqûres accidentelles.**




### Caractéristiques de sécurité

- Le sceau de protection garantit que le mylife™ SafetyLancet n'a pas été utilisé
- Le capuchon de protection préserve la stérilité et empêche toute contamination avant l'utilisation
- L'aiguille recouverte avant et après l'utilisation prévient les blessures par piqûre d'aiguille
- Inutilisable après emploi grâce au système de verrouillage


### Caractéristiques de confort

- La pénétration à grande vitesse réduit la douleur, la perception du prélèvement s'assimile à un effleurement
- La qualité supérieure de l'aiguille (pointe à triple facette) garantit un débit sanguin optimal et un confort maximal
- Aucune mise sous pression ni assemblage n'est nécessaire avant l'utilisation


### Comment utiliser le mylife™ SafetyLancet

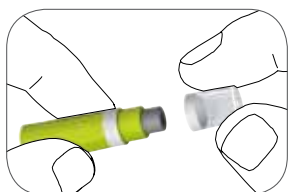


**1** Dévisser et retirer simplement le capuchon du mylife™ SafetyLancet.

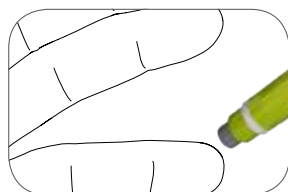

**2** Placer le mylife™ SafetyLancet sur le doigt.

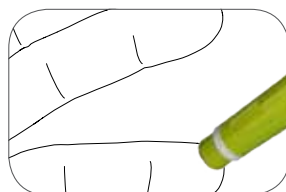

**3** Pousser fermement la plateforme surélevée contre l'emplacement choisi pour activer le mécanisme de l'autopiqueur.

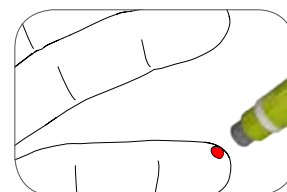

**4** L'aiguille se rétracte immédiatement après utilisation. Le système de verrouillage empêche le mylife™ SafetyLancet d'être réutilisé, même par inadvertance.



**5** Eliminer le mylife™ SafetyLancet, selon la législation locale.

**i mylife™ SafetyLancets**

Des autopiqueurs de sécurité, stériles et jetables, pour un prélèvement de sang sûr et confortable dans le cadre d'une routine médicale

Disponible en boîtes de 200 avec un couvercle hermétique très pratique.



**Conçues pour contrôler la glycémie et effectuer d'autres tests de diagnostic:**

- dans les cliniques pour diabétiques
- dans les hôpitaux
- lors de soins à domicile
- etc.

**Stérilité préservée pendant 3 ans**

La dose de stérilisation a été définie selon la norme ISO 11137

Stérilisé par irradiation au Co 60

N° réf.	Qté.	Description	Gauge	Diamètre d'aiguille	Longueur d'aiguille	Diamètre extérieur du boîtier
7100031	200 pièces	mylife™ SafetyLancets	28G	0.36 mm	3.0 +/- 0.3 mm	10.5 +/- 2.0 mm

Téléphone gratuit : 0800 44 11 44

Pour plus d'informations visitez [www.mylife-diabetescare.ch](http://www.mylife-diabetescare.ch)

Ypsomed AG // Marché suisse // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf

[www.ypsomed.com](http://www.ypsomed.com) // T +41 34 424 41 41 // F +41 34 424 33 20 // [swissmarket@ypsomed.com](mailto:swissmarket@ypsomed.com)